



# e-CELSIUS Performance®

Chers clients, nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition du système e-CELSIUS Performance®. De manière à vous permettre d'utiliser le système dans les meilleures conditions, vous trouverez ici quelques recommandations liées à sa première utilisation.




Ce document ne remplace en aucun cas le manuel utilisateur, nous vous recommandons de prendre connaissance de l'ensemble des instructions incluses dans le manuel d'utilisation.

Le système e-CELSIUS Performance® n'étant pas revendiqué compatible avec l'IRM, il est impératif que le patient ingérant une capsule ne passe aucun examen IRM. Le patient devra porter au poignet le bracelet fourni avec le système, indiquant qu'il est porteur d'un dispositif électronique non compatible avec l'exposition à un fort champ magnétique.

Le bracelet est fixé au moment de l'ingestion et ne doit être retiré qu'après expulsion de la capsule.

Le manuel utilisateur est disponible en version PDF (consultable via le programme Adobe Reader) sur la clé USB fournie avec le système ou sur le site <http://www.bodycap-medical.com>. Il est possible d'obtenir le manuel utilisateur sous format papier en contactant BODYCAP (coordonnées ci-dessus) sans frais supplémentaire. Bodycap s'engage à fournir le manuel utilisateur sous 7 jours. Ce manuel peut être régulièrement mis à jour, celles-ci sont annoncées sur le site Web de la société.

## Ensemble des éléments du système :

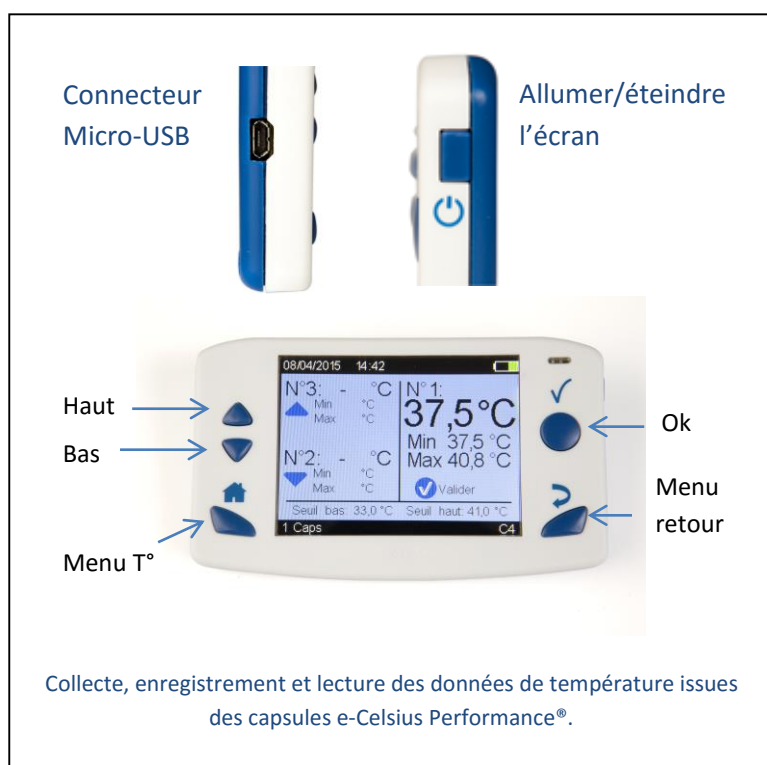

## Première utilisation, Instructions élémentaires

Ces instructions vous permettront de démarrer votre système. De manière à prendre connaissance de l'ensemble des fonctionnalités, veuillez-vous référer au manuel utilisateur fourni sur la Clé USB BodyCap

Avant la première utilisation de votre système, vous devez réaliser un ensemble d'opérations

### 1- Installation du logiciel e-Celsius Performance Manager

Vous devez installer votre logiciel avant toute utilisation de votre système. C'est l'outil indispensable pour paramétrer e-Viewer Performance. Pour installer le logiciel e-Celsius Performance Manager et les pilotes du moniteur, veuillez lancer le fichier "e-Perf\_Manager\_X.X.X.X.exe" ou "MAC-e-Perf Manager\_X.X.X.X.exe" présents sur la clé USB BodyCap fournie dans le Kit de démarrage.

Configuration minimum requise :

Processeur 1GHz


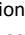
500 Mo d'espace disque requis  
Système d'exploitation Windows 7® ou ultérieurs compatibles (32 ou 64 bits)/ Mac OS X (10.9 Lion) ou ultérieurs  
1024x768 pour la résolution d'écran

### 2- Matériel


- Ordinateur avec le logiciel e-Celsius Performance Manager installé
- Moniteur e-Viewer Performance
- Capsule e-Celsius Performance
- Activeur
- Câbles et bloc d'alimentation

### 3- Mise en place



Voici un résumé des étapes avant l'ingestion d'une capsule :

-Allumer le moniteur en appuyant simultanément sur les boutons «  » et «  ». Répéter 2 fois cette manipulation. Mettre à charger si le niveau de batterie est faible.

-Brancher le moniteur à l'ordinateur avec le câble USB fourni et lancer le logiciel e-Celsius Performance Manager. Cliquer sur configuration-

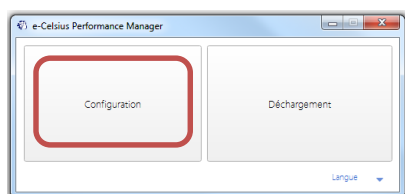

Configurer le moniteur (grâce aux onglets moniteur et Sujet).

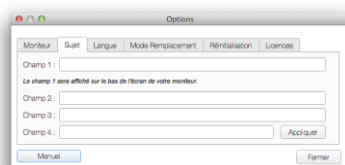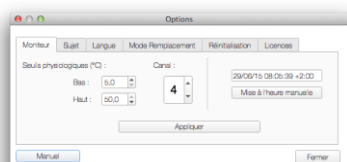

-Fermer le logiciel et débrancher le moniteur

-Brancher l'activeur via le bloc d'alimentation

-Naviguer dans le Moniteur dans le menu Capsule puis Activation Capsule

-Le moniteur guide ensuite les étapes de l'association de la capsule au moniteur


- Noter le numéro de série et le canal affiché sur l'écran du moniteur (utile en cas de problème du moniteur)


	N° de série	Canal
Capsule 1		
Capsule 2		
Capsule 3		

-La capsule étant associée au moniteur, elle peut être ingérée.

### 4- Suivi du sujet


Le moniteur reçoit les données de la capsule. Durant un cycle de mesure :

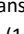Il est possible de suivre en temps réel la Température si la capsule est dans un environnement proche du moniteur (1 à 2 mètre). Pour cela, allez dans le menu « Données » puis « Visualisation des données » ou appuyez sur le bouton «  ». En appuyant sur le bouton OK sur l'écran des trois capsules, l'écran détaillé apparaît. Ces modes d'affichage permettent de garder un affichage permanent des données, sans mise en veille de l'écran.

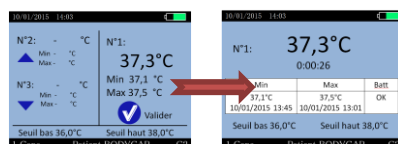

Il est possible d'ajouter des marqueurs via le menu « Données » puis « Ajouter un marqueur ». Les marqueurs permettent de repérer un instant important et sont tracés sur le graphe du logiciel e-Celsius Performance Manager.

### 5- Visualisation a posteriori du cycle de mesure

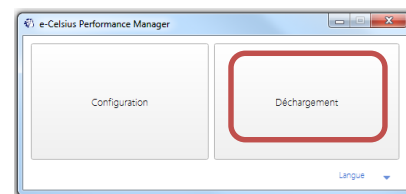
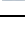


Brancher le moniteur à l'ordinateur et cliquer sur « Déchargement ». La courbe obtenue n'est pas sauvegardée par l'application. Exporter les données sous forme de courbe (PDF) ou de tableau (CSV) et les sauvegarder sur votre ordinateur. Il est possible de visualiser la courbe en cours de cycle de mesure.

### 6- Arrêt du système

Visualiser la courbe via e-Celsius Performance Manager et exporter les données pour les imprimer/sauvegarder.

Désassocier les capsules du moniteur via le menu « Capsule » puis « Désassociation Capsule ». Enfin sélectionner la capsule à désassocier. Cette procédure atteint la gélule si celle-ci est dans l'environnement de communication.

Pour éteindre le moniteur, maintenez simultanément les boutons «  » et «  ».

### 7- Check-list avant ingestion

Moniteur :


- Niveau de batterie
- Heure du moniteur
- Canal libre (un moniteur par canal)
- Seuil d'alarme

Capsule :

- Usage unique
- Activée et associée à un moniteur via l'activeur
- Numéro de série noté

Pour toute question relative au fonctionnement du système, dont les réponses ne figurent pas dans le manuel utilisateur, contactez BodyCap :

**BODYCAP**  
6 rue de la Girafe  
14000 Caen  
FRANCE

 +33. (0)2.61.53.08.14

 [support@bodycap-medical.com](mailto:support@bodycap-medical.com)

 [www.bodycap-medical.com](http://www.bodycap-medical.com)